

## **Procédure de préparation de la biopsie endométriale en vue d'un Win-Test**

### **√ Matériel fourni par nos soins : kit Win-Test**

Une boîte contenant des aliquotes de tampon RLT de chez Qiagen de 1 ml vous seront ou vous ont été envoyés à vous ou votre patiente.

Stocker les aliquotes de tampon RLT à TEMPERATURE AMBIANTE.

### **√ Procédure de préparation de la biopsie :**

Vider le contenu de la canule de Cornier (non fournie) directement dans le cryotube contenant le tampon RLT (un fragment d'endomètre correspondant environ à 1 cm) et congeler le plus rapidement possible (directement à -80°C, carboglace ou azote liquide). Stocker les échantillons à -80°C, azote liquide ou carboglace jusqu'à l'envoi. Envoyer les tubes dans de la carboglace (il ne doit pas y avoir de décongélation pendant le transport).

ATTENTION : Ne pas oublier d'identifier les tubes (dates et nom).  
Placer une seule biopsie par cryotube.

### **√ Adresse de livraison :**

GAIN  
Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie (IRMB)  
Hôpital Saint-Eloi  
CHU de Montpellier  
80, av. Augustin Fliche  
34295 Montpellier Cedex 5